



Afname urine

Urinepotje met opzuigsysteem in het deksel

- 1 Druk het buisje in de opening in het deksel van het potje met urine.
- 2 Houd het buisje zo lang op het potje totdat het zichzelf niet meer vult. Het buisje moet zo volledig mogelijk gevuld zijn (vol = 4 ml). **De minimale hoeveelheid is 2 ml.** Bij minder dan 2 ml kan het materiaal niet in behandeling worden genomen.
- 3 Schud het buisje goed zodat de urine vermengd wordt met de inhoud van het buisje.
- 4 Bewaar het gevulde buisje bij **kamertemperatuur**.



Afname urine

Urinepotje zonder opzuigsysteem in het deksel

- 1 Open het potje urine.
- 2 Steek het opzuigrietje in de urine.
- 3 Druk het buisje op het opzuigrietje. Zorg ervoor dat het rietje in de urine blijft.
- 4 Houd het buisje zo lang op het opzuigrietje totdat het zichzelf niet meer vult. Het buisje moet zo volledig mogelijk gevuld zijn (vol = 4 ml). **De minimale hoeveelheid is 2 ml.** Bij minder dan 2 ml kan het materiaal niet in behandeling worden genomen.
- 5 Haal het buisje van het opzuigrietje. Gooi het rietje weg.
- 6 Schud het buisje goed zodat de urine vermengd wordt met de inhoud van het buisje.
- 7 Bewaar het gevulde buisje bij **kamertemperatuur**.

